
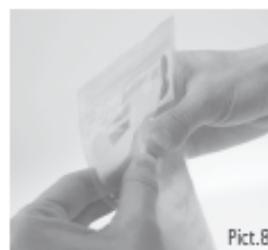


Easy Freeze. Пакет для хранения и замораживания грудного молока

Храните грудное молоко с Easy Freeze

Ardo medical AG 99.03.279 / 09.11

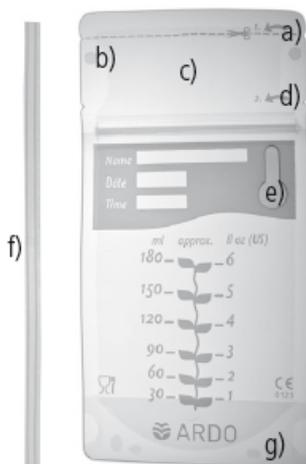

Комплектация:

- пакеты для замораживания - 20 шт.,
- полоса для закрепления пакетов - 20 шт.

Обозначения:

- a) линия отреза
- b) отверстия для полосок закрепления Easy Freeze
- c) стерильный пакет для хранения
- d) перфорированная линия – замок пакета
- e) индикатор температуры
- f) полоса для закрепления пакета
- g) дно пакета Easy Freeze

Как использовать Easy Freeze:

1. Напишите на пакете имя (если необходимо), дату и время.
- 2-3. Для заполнения грудным молоком пакета Easy Freeze отрежьте пакет по линии разреза. (Рис. 1)
4. Откройте застежку-молнию (Рис. 2)
5. Проденьте полосу для закрепления сквозь специальные отверстия пакета (Рис. 3)
6. Поместите нижнюю часть воронки молокоотсоса в пакет EasyFreeze до уровня замка пакета (Рис. 4)
7. Закрепите пакет герметизирующей полосой (Рис. 5)
8. Сцедите молоко и снимите пакет с молокоотсоса
9. Удалите верхнюю часть пакета над перфорированной линией – замком (Рис. 6)
10. Расправьте дно пакета, для более устойчивого положения (Рис. 7)
11. Мягко надавите на пакет, чтобы удалить остатки воздуха (Рис. 8)
12. Застегните замок пакета (Рис. 9)

Хранение грудного молока: При комнатной температуре (не более 25°C) - 6 часов; в холодильнике: 5 дней при температуре не выше 4°C; в морозильном отделении холодильника: 3-6 месяцев; в морозильной камере: 6-12 месяцев при температуре не более -20°C

Размораживание грудного молока:

- 1 способ: Погрузите пакет с молоком в теплую воду и дождитесь, пока молоко разморозится.
 - 2 способ: Поместите пакет с молоком в холодильник и дождитесь пока молоко разморозится.
 3. Как только грудное молоко полностью разморожено, его можно нагревать до необходимой температуры.
- Предупреждение: не подогревайте молоко в микроволновой печи.

Подогрев грудного молока:

1. Приоткройте пакет, и дайте воздуху проникнуть внутрь (уровняйте давление снаружи и внутри пакета).
2. Тщательно закройте пакет, индикатор температуры не должен быть ничем закрыт.
3. Выдержите пакет в воде при температуре приблизительно 70°C.
4. Индикатор температуры пакета начнет становиться прозрачным.
5. После нескольких минут индикатор будет абсолютно прозрачен, это означает, что молоко согрелось до нужной температуры
6. Обязательно проверьте температуру молока на внутренней части запястья. Если, Вы не ощущаете, что молоко горячее, это означает что молоко согрелось до температуры не более 37°C и готово к использованию.

⚠ Важные Примечания

Индикатор температуры изменит цвет на серый, если молоко стало излишне горячим. Если температура понизится ниже 32°C, индикатор станет синим.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Всегда проверяйте температуру грудного молока прежде, чем кормить ребенка. Температура грудного молока, предназначенного для кормления малыша должна быть не более 37°C. Грудное молоко никогда не должно размораживаться или подогреваться в микроволновой печи.



Защищайте упаковку от прямых солнечных лучей.



Продукт одноразового использования.



Хранить при атмосферном давлении не более: 90 кПа - 106 кПа.



Хранить при относительной влажности: 20 % - 95 %



Температурный режим: эксплуатация при температуре от -10 до +40°C, транспортировка при температуре от -20 до +50°C



Можно утилизировать в соответствии с местными нормами утилизации (не токсично).



Медицинское оборудование – класс 2.



Состав: полиэтилен, полиамид.



Производитель: Ardo.

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland
T +41(0)41 754 70 70
F +41(0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardo.ch

 **ARDO**
Hospital Recommended